

SpiderFX™

Устройство Для Профилактики Эмболии

Код продукта	Размер фильтра (мм)	Размер просвета сосуда (мм)	Длина проводника ОТW/RX (см)	Диаметр проводника (дюймы/мм)	Часть для введения удерж. проводника	Часть для извлечения удерж. проводника	Направляющий катетер/ интродьюсер
					Поперечное сечение (F)	Диаметр (F)	Минимальный внутренний диаметр (дюймы)
SPD2-030-190	3.0	2.0 - 3.0	190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-030-320	3.0	2.0 - 3.0	320/190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-040-190	4.0	3.1 - 4.0	190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-040-320	4.0	3.1 - 4.0	320/190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-050-190	5.0	4.1 - 5.0	190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-050-320	5.0	4.1 - 5.0	320/190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-060-190	6.0	4.5 - 6.0	190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-060-320	6.0	4.5 - 6.0	320/190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-070-190	7.0	5.5 - 7.0	190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066
SPD2-070-320	7.0	5.5 - 7.0	320/190	0.014/0.36	3.2	4.2	0.066

Sold in single units.

<sup>1</sup>Kasirajan K et al. The Use of Mechanical Thrombectomy Devices in the Management of Acute Peripheral Arterial Occlusive Disease. *J Vasc Interv Radiol.* 2001;12:405-411.

<sup>2</sup>Wholey MH et. al. Comparison of Thrombolytic Therapy of Lower Extremity Acute, Subacute, and Chronic Arterial Occlusions. *Cathet Cardiovasc Diagn.* 1998;44:159-169.

<sup>3</sup>Siablis D et. al. Outflow Protection Filters During Percutaneous Recanalization of Lower Extremities' Arterial Occlusions: A Pilot Study. *Eur J Radiol.* 2005; 55:243-249.

<sup>4</sup>Suri R et. al. Distal Embolic Protection During Femoropopliteal Atherectomy. *Catheter Cardiovascular Intervention.* 2006;67:417-422.

<sup>5</sup>Karnabatidis D et. al. Distal Embolism During Percutaneous Revascularization of Infra-Aortic Arterial Occlusive Disease: An Underestimated Phenomenon. *J Endovasc Ther.* 2006;13:269-280.

<sup>6</sup>Shammas NW et. al. Preventing Lower Extremity Distal Embolization Using Embolic Filter Protection: Results of the PROTECT Registry. *J Endovasc Ther.* 2008;15:270-276.

# БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Устройство для профилактики эмболии предназначено для использования в **сонных, коронарных** и **периферических** артериях.

SpiderFX™  
Устройство Для  
Профилактики Эмболии

## Medtronic

[www.medtronicendovascular.com](http://www.medtronicendovascular.com)

[www.cardiovasc.ru](http://www.cardiovasc.ru)

ООО "Медтроник"

123317, Москва,

Пресненская набережная, д. 10

Тел.: +7 (495) 580-73-77

Факс: +7 (495) 580-73-78

E-mail: [info.russia@medtronic.ru](mailto:info.russia@medtronic.ru)

[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)

UC201608114RU ©2016 Medtronic.  
Все права защищены. Отпечатано в России.

**Medtronic**  
Further, Together

# ПРОФИЛАКТИКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ


Несмотря на то, что риск осложнений, связанных с эмболией различными частицами существует при всех типах интервенционных вмешательств, пациенты с критической ишемией нижних конечностей имеют значительно более высокий риск возникновения эмболии, так же как и пациенты с поражениями сложной морфологии, в частности - кальцинированные стенозы.

Устройства для профилактики эмболии используются для захвата и удаления фрагментов/частиц, образующихся при интервенционных вмешательствах. Частицы могут мигрировать с током крови и блокировать мелкие кровеносные сосуды, приводя к неблагоприятным клиническим результатам.

Дистальная эмболия является потенциальным осложнением при выполнении чрескожной атерэктомии и других эндоваскулярных процедур, может привести к неблагоприятному исходу для пациента и к увеличению затрат для больницы. Устройства для профилактики эмболии показали высокий уровень безопасности при проведении процедур, а также сокращение случаев эмболии, что подтверждено клиническими исследованиями.

**Графики 1а-1с.**  
Сравнение расходов на пациента

■ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ  
■ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ SPIDERFX™

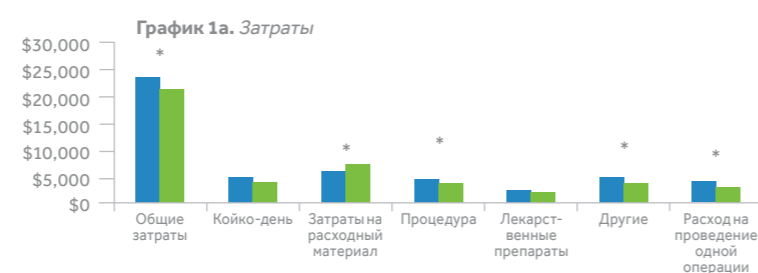

**График 2.**  
Сравнение общих расходов клиники

■ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ  
■ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСТАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ SPIDERFX™



Использование устройства для профилактики дистальной эмболии SpiderFX позволяет сократить:

- Общие затраты
- Время пребывания в клинике
- Время нахождения в палате интенсивной терапии
- Время использования операционной

В целом, результаты использования устройства для профилактики эмболии SpiderFX демонстрируют значительное сокращение затрат клиники.

# ВЫБОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ


## Выбор артерии

- Устройство для профилактики эмболии SpiderFX™ имеет широкий спектр показаний: предназначено как для использования в **сонных** и **коронарных** артериях, так и в **периферических** артериях.

## Выбор доставки

- Устройство совместимо с 0.014" и 0.018" проводниками, или может быть доставлен через проводниковый катетер\*. Это позволяет более **точно позиционировать устройство в целевом сегменте.**

\* Процедуры на нижних конечностях

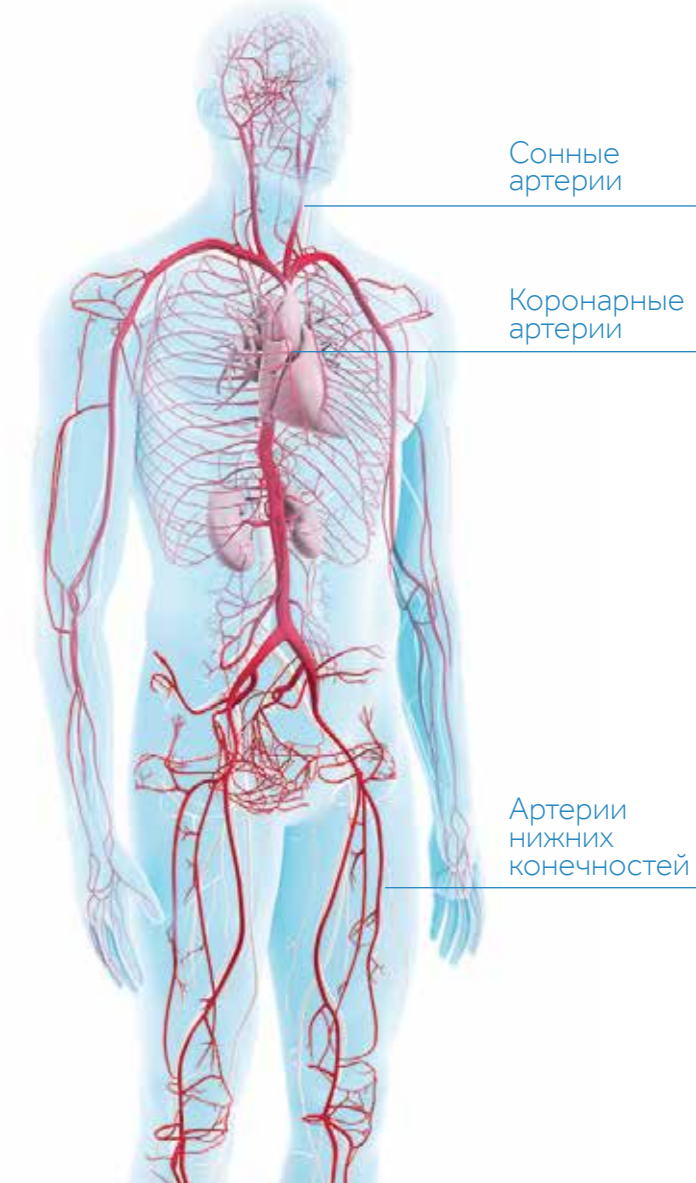

# ДИЗАЙН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

## Дизайн фильтра - корзина

Устройство для профилактики эмболии SpiderFX™ представляет собой уникальный гибкий плетёный нитиноловый фильтр, плотно прилегающий к сосудистой стенке. Ток крови проходит через конус фильтра, который эффективно захватывает частицы, сохраняя нормальную перфузию.

## Рентгеноконтрастные маркеры

Золото-вольфрамовая петля по окружности фильтра, вместе с рентгеноконтрастными маркерами, обеспечивает точную установку и верификацию положения устройства в зоне интервенционного вмешательства.

## Подвижный проводник

Удерживающий проводник (доступен длиной 190 и 320 см) может вращаться и передвигаться в продольном направлении независимо от фильтра, что обеспечивает повышенную стабильность при процедуре. Доступно несколько размеров устройства для профилактики эмболии SpiderFX™ (3-7 мм), что обеспечивает высокую адаптацию фильтра к стенке сосудов различного диаметра.

