



РУКОВОДСТВО ПО ИМПЛАНТАЦИИ

Алгоритм Подготовки Стент-Графта:


1. Изучите стент-графт под рентгеноскопией для визуализации рентгеноконтрастных маркеров
2. Промойте просвет для проводника с тыльной стороны через люэр-порт
3. Смочите оболочку системы доставки для активации гидрофильного покрытия

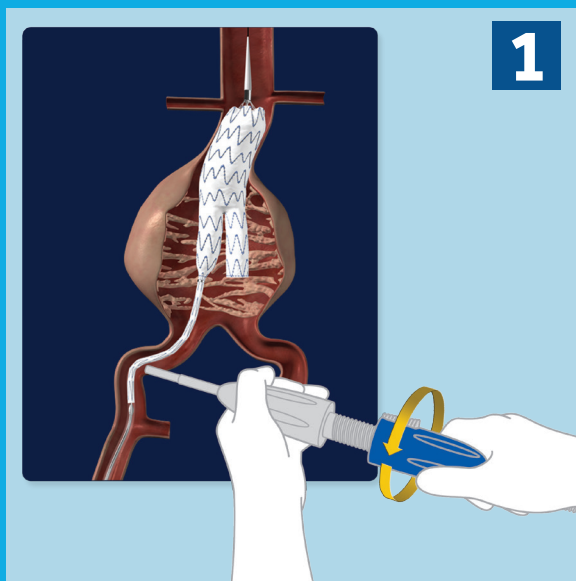


Начните раскрытие проксимальной части стент-графта

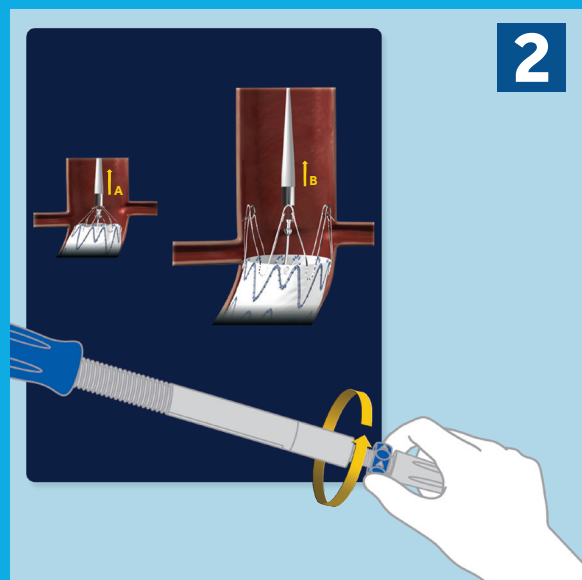


Высвободите проксимальную корону с фиксирующими зубцами

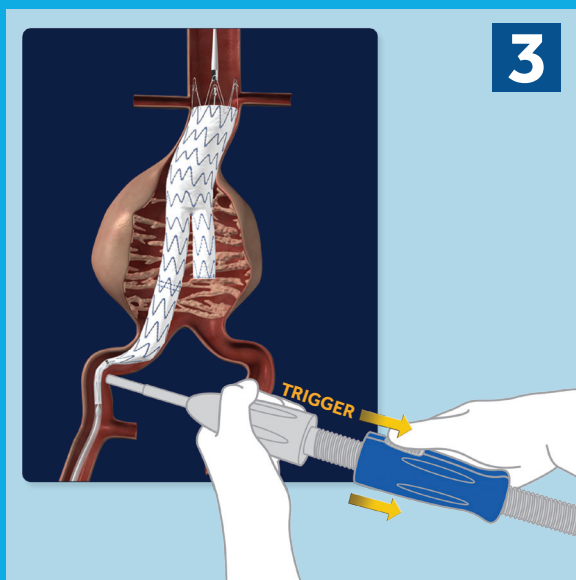


Завершите раскрытие

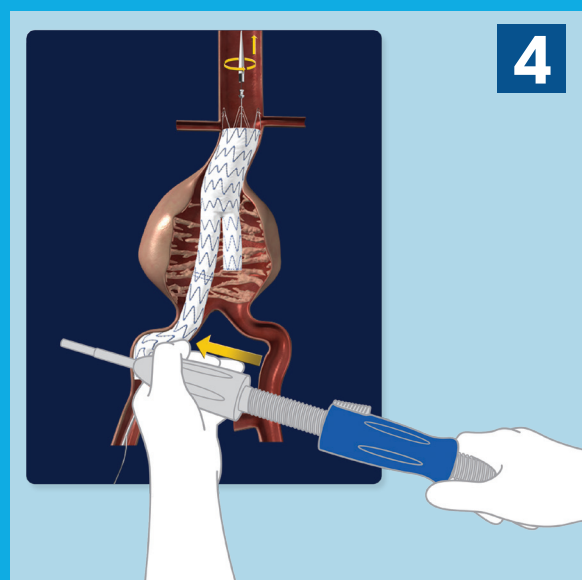


Поверните и продвиньте систему доставки
вверх на 3 см

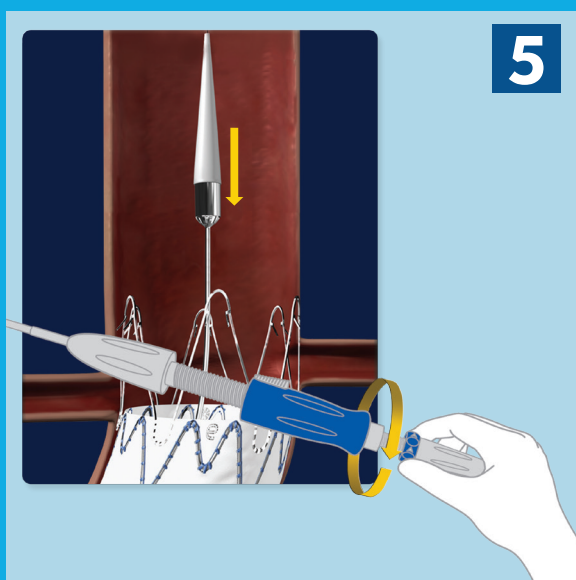


Верните рукоятку высвобождения проксимальной короны в исходное положение

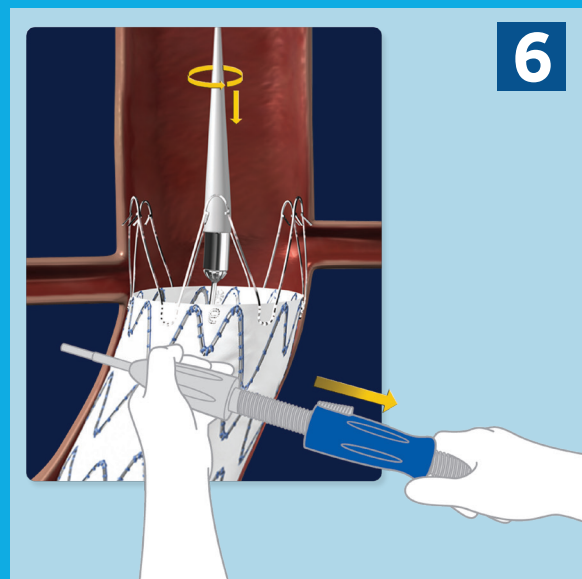


Поверните и закройте оболочку системы доставки стент-графта

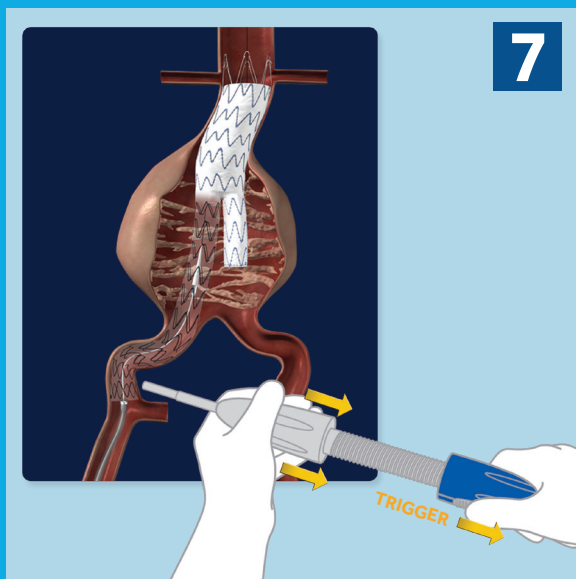

Извлеките систему доставки

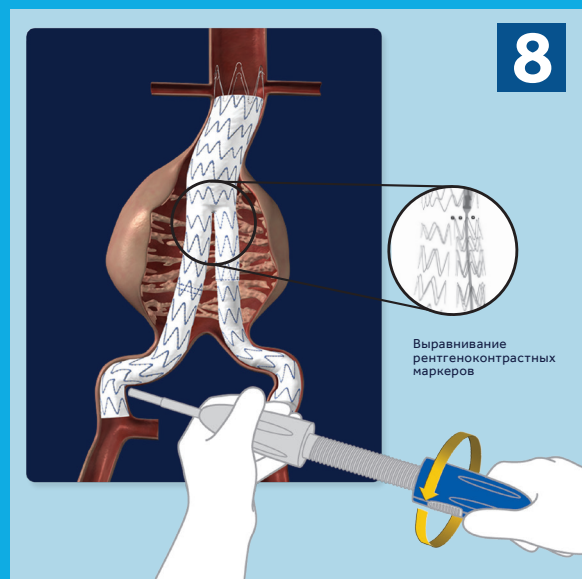


Раскройте контралатеральный компонент

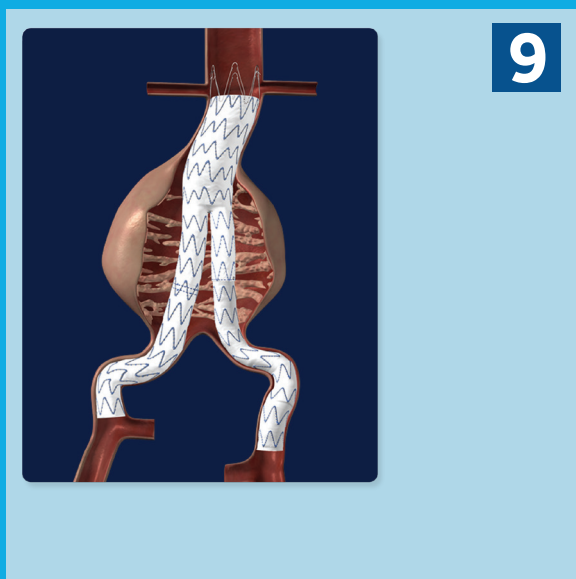

Брюшной Стент-Графт Endurant II
успешно имплантирован

РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ

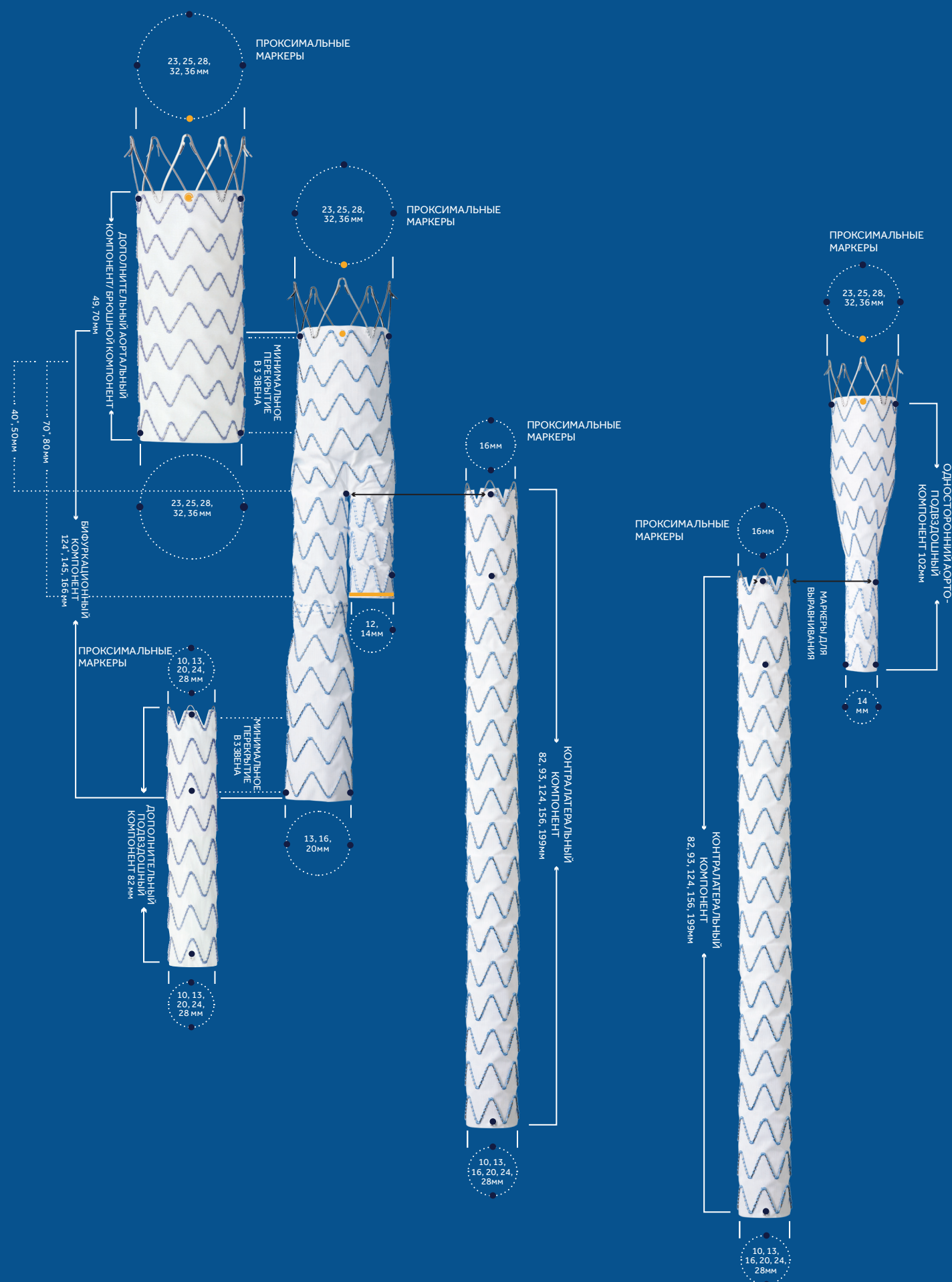

ЧЕТКИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МАРКЕРЫ

- Точечные рентгеноконтрастные маркеры
- е-образный проксимальный маркер
- Кольцевой маркер - виден только при рентгеноскопии

* Размеры для бифуркационного стент-графта длиной 124 мм.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРОВ

БИФУРКАЦИОННЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Endurant II (мм)
19-20	23
21-22	25
23-25	28
26-28	32
29-32	36

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Endurant II (мм)
8-9	10
10-11	13
15-18	20
19-22	24
23-25	28

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Диаметр Сосуда (мм)	Рекомендуемый Диаметр Endurant II (мм)
8-9	10
10-11	13
12-14	16
15-18	20
19-22	24
23-25	28